



Silverin Silvernitrattsticka 75% TUNNARE, FLEXIBEL 115mm, 100st stickor i 1 fp
Används bla vid näsblödningar, passar alla näsor





SILVERIN®

SILVERNITRATSTICKOR

MEDICINTEKNISK PRODUKT

- FÖR BORTTAGNING AV GRANULATIONSVÄV
- FÖR BORTTAGNING AV UMBILIKALGRANULOM
- FÖR ATT STOPPA NÄSBLÖDNING, BLÖDNING EFTER BIOPSI ETC
- FÖR SÅRBEHANDLING
- FÖR STOMAVÅRD
- FÖR BEHANDLING AV VÅRTOR OCH FOTSVAMP

Stickorna är för engångsbruk, har blodstillande och bakteriedödande effekt. Silvernitratet sitter kvar på stickan och går ej av vid användning.

Silvernitratstickor är en produkt som innehåller silvernitrat och kaliumnitrat på spetsen.

Terapeutiska indikationer och användning:

Silvernitratstickor tar bort överflödig granulationsvävnad som kan utvecklas i läkande sår på huden, t.ex. kirurgiska håligheter med granulationsvävnad. De är lämpliga för användning inom sårvård, stomavård och för behandling av afte (munblåsor). Silvernitratstickor används för hemostas vid mindre blödningar som näsblod (epistaxis) eller efter biopsier. De används ofta för att ta bort vårtor och inom medicinsk fotvård (t.ex. för att ta bort granulationsvävnad vid ingrodda tånaglar). Restvävnad från navelsträngar hos nyfödda kan enkelt tas bort, men behandlingen bör utföras av läkare eller barnmorska. Appliceringen är snabb, enkel och orsakar oftast inte någon smärta. För behandlingen finns olika koncentrationer (50 %, 75 %), längder (115 mm - 4,5“, 200 mm - 7,9“) och material (trästickor - stela, plaststickor - flexibla). Olika grupper av hälso- och sjukvårdspersonal har sina egna preferenser, och det finns inga formella rekommendationer angående styrka, längd eller material.

Bruksanvisning:

Med undantag för behandling av vårtor, får silvernitratstickor endast användas av vårdpersonal. Stickans spets bör fuktas med vatten. Om det finns tillräckligt med fukt på området som ska behandlas, kan det vara onödigt att fukta stickan. Målet är att överföra vattnet från spetsen, rikt på silvernitrat, till det behandlade området. Området bör beröras genom att dutta och rulla spetsen flera gånger, utan att

gnugga eller trycka, och se till att använda så exakt precision som möjligt. Det behandlade området kommer att missfärgas och lossna från den omgivande vävnaden efter några dagar. Det kan ta upp till 24 timmar innan det behandlade området blir svart. Vid behov kan behandlingen upprepas var 2–3 dag tills önskat resultat har uppnåtts. Silvernitratstickor ska endast appliceras på det område som ska behandlas och är avsedda för engångsbruk.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Kontakt med silvernitratstickor på nyfödda och känslig hud bör vara kortvarig. För alla ovanligt färgade eller ovanligt formade hudförändringar som inte tydligt kan identifieras som granulationsvävnad eller normala vårtor, är Silverin® Stickor endast avsedda för användning under medicinsk övervakning.
- Kläder och andra föremål ska skyddas vid hantering av stickorna. Silvernitrat orsakar brun-svarta fläckar som inte kan tas bort med vanliga rengöringsmedel.
- Hälsosam hud som oavsiktligt har kommit i kontakt med stickans spets måste rengöras noggrant med rinnande vatten och en svamp; trots rengöring kan kontakt med stickans spets orsaka en ofarlig mörk missfärgning av de drabbade hudområdena. Den mörka färgen försvinner efter cirka 10–14 dagar.
- Om silvernitratstickan kommer i kontakt med ögat, bör det sköljas omedelbart med rinnande vatten i minst 5 minuter med ögonlocket öppet och därefter bör en läkare konsulteras.
- Vid behandling av mun och svalg är det viktigt att säkerställa att inga delar av silvernitratstickorna kan sväljas, då detta kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Innehåll och förpackningsstorlek:

Ingredienser:

Silvernitrat och kaliumnitrat

Tillgängliga koncentrationer:

50 % Silvernitrat

75 % Silvernitrat

Förpackningsstorlek:

10 och 100 stycken, längd 115 mm (4,5“)

10 och 100 stycken, längd 200 mm (7,9“)

Båda storlekarna finns som stela och flexibla stickor.

Återförsäljare i Sverige:

OPIVA Nordic AB

Företagsparken

Datavägen 25

436 32 ASKIM

Tfn växel: +46 31 28 82 00

Mb: +46 725 30 28 82

Email: mette.stahlgren@opivanordic.se